



RSUD  
Dr.M.ZEIN  
PAINAN

**PROSES STERILISASI PEMBERIAN TANDA  
BAHAN/ALAT YANG AKAN DISTERILKAN**

<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	No Dokumen. 023/SPO-RSUD/10.10/II/2019	No Revisi 02	Halaman 1/2
	<b>Tanggal Terbit 4 Januari 2019</b>	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  dr. H. Sutarman, MM NIP. 19690709 200112 1 001	
<b>Pengertian</b>	Adalah proses dan tata cara pemberian tanda sterilisasi pada alat yang akan disterilkan, sehingga memberikan kemudahan bekerja		
<b>Tujuan</b>	Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemberian tanda sterilisasi pada alat yang akan disterilkan		
<b>Kebijakan</b>	1. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.05/RSUD-SK/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Revisi Kebijakan PPI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan. 2. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.10/RSUD-SK/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Revisi Pedoman Pelayanan Sterilisasi Komite PPI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.		
<b>Prosedur</b>	1. Precleaning dengan menggunakan enzimatik 2. Lakukan pencucian dan pengeringan 3. Pengemasan menggunakan Pouches. Untuk Bowel Kamar Operasi menggunakan kain 4. Kemasan diberi indikator luar dan indikator dalam. Penulisan tanggal dilakukannya sterilisasi ditulis di indikator luar 5. Kemasan siap untuk disterilkan - Periksa ulang pengepasan masker		

<b>Unit Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. CSSD</li><li>2. Ruang Rawat Inap</li><li>3. Poliklinik</li><li>4. Kamar Operasi</li><li>5. ICU</li><li>6. Hemodialisa</li></ol>
---------------------	--