



RSUD  
Dr.M.ZEIN  
PAINAN

## STERILISASI BAHAN/ALAT DARI LOGAM DENGAN MENGUNAKAN AUTOCLAVE

<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	No Dokumen. 028/SPO-RSUD/10.10/II/2019	No Revisi 02	Halaman 1/2
	<b>Tanggal Terbit 4 Januari 2019</b>	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  dr. H. Sutarman/ MM NIP. 19690709 200112 1 001	
<b>Pengertian</b>	Adalah usaha untuk membuat bahan/alat dari logam menjadi steril dengan menggunakan mesin sterilisasi		
<b>Tujuan</b>	Sebagai acuan pelaksanaan penyetrilan bahan/alat dari logam guna memenuhi kebutuhan bahan/alat dari logam steril di RSUD Dr. M. Zein Painan		
<b>Kebijakan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.05/RSUD-SK/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Revisi Kebijakan PPI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.</li><li>Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.10/RSUD-SK/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Revisi Pedoman Pelayanan Sterilisasi Komite PPI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.</li></ol>		
<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Alat di antar ke CSSD dengan menggunakan kontainer tertutup</li><li>Pengantar dan penerima barang mencatat barang/alat yang akan disterilkan pada buku ekspedisi</li><li>Petugas sterilisasi melakukan perendaman dengan menggunakan enzimatik, pencucian dan lalu pengeringan</li><li>Setelah alat kering, alat di pouches dan diberi indikator dalam dan indikator luar</li></ol>		

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tulis tanggal dilakukan sterilisasi di indikator luar</li> <li>6. Bahan/alat dimasukkan kedalam auto clave yang telah disiapkan kemudian ditutup rapat</li> <li>7. Temperatur yang dipakai 121<sup>0</sup>C selama 60 menit</li> <li>8. Setelah proses sterilisasi selesai, bahan/alat dikeluarkan dari auto clave untuk pendinginan</li> <li>9. Petugas sterilisasi memberitahukan kebagian pengiriman barang/alat untuk menjemput barang/alat yang sudah steril</li> <li>10. Petugas ruangan dan petugas sterilisasi menandatangani buku ekspedisi barang/alat steril</li> </ol>
<p><b>Unit Terkait</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CSSD</li> <li>2. Ruang Rawat Inap</li> <li>3. Poliklinik</li> <li>4. Kamar Operasi</li> <li>5. ICU</li> <li>6. Hemodialisa</li> </ol>