




**RSUD
Dr.M.ZEIN
PAINAN**

PROSES STERILISASI BAHAN/ALAT KESEHATAN NON LOGAM

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No Dokumen. /SPO-RSUD/10.11/I/2021	No Revisi 03	Halaman 1/2
	Tanggal Terbit 03 Oktober 2021	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  dr. Krefa, Sp.PD NIP. 19730103 200212 1 005	
Pengertian	Adalah usaha untuk membuat bahan/alat non logam menjadi steril dengan menggunakan mesin sterilisasi		
Tujuan	Sebagai acuan pelaksanaan penyetrilan bahan/alat non logam guna memenuhi kebutuhan bahan/alat dari logam steril di RSUD Dr. M. Zein Painan		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.05/RSUD-SK/I/2021 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Revisi Kebijakan PPI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.2. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.11/RSUD-SK/I/2021 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Revisi Pedoman Manajemen Linen Komite PPI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Alat di antar ke CSSD dengan menggunakan kontainer tertutup alat kotor.2. Pengantar dan penerima barang mencatat barang/alat yang akan disterilkan pada buku ekspedisi3. Petugas sterilisasi melakukan perendaman dengan menggunakan DTT, dicuci sampai bersih lalu dikeringkan, dan difouches4. Tulis tanggal dilakukan sterilisasi5. Petugas sterilisasi memberitahukan bagian pengiriman barang/alat untuk menjemput barang/alat yang sudah steril		

	6. Petugas ruangan dan petugas sterilisasi menandatangani buku ekspedisi barang/alat steril
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. CSSD 2. Ruang Rawat Inap 3. Poliklinik 4. Kamar Operasi 5. Hemodialisa 6. IGD