



**RSUD
Dr.M.ZEIN
PAINAN**

**PENGEMASAN/PENGEPAKKAN ALAT/BAHAN
AKAN DISTERILKAN**

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No Dokumen. /SPO-RSUD/10.10/I/2021	No Revisi 03	Halaman 1/2
	Tanggal Terbit 03 Oktober 2021	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  Drs. Harefa, Sp.PD NIP. 19730103 200212 1 005	
Pengertian	Cara untuk mengemas/mengpak alat/ bahan kesehatan yang akan di pakai ulang untuk menekan kejadian infeksi HAIs di RSUD Dr.Muhammad Zein Painan.		
Tujuan	Sebagai acuan penyelenggara pengemasan/pengepakan alat/bahan kesehatan di sterilkan		
Kebijakan	1. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.05/RSUD-SK/I/2021 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Revisi Kebijakan PPI RSUD Dr.Muhammad Zein Painan. 2. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. 800/10.10/RSUD-SK/I/2021 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Revisi Pedoman Pelayanan Sterilisasi Komite PPI RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.		
Prosedur	1. Setelah alat dikeringkan, alat dipisahkan sesuai jenisnya 2. Pengemasan dilakukan dengan menggunakan pouches 3. Untuk bowel kamar operasi, pengemasan dilakukan dengan menggunakan alat tenun 4. Beri indikator luar dan indikator dalam 5. Beri etiket 6. Lakukan sterilisasi		

Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. CSSD2. Ruang Rawat Inap3. Poliklinik4. Kamar Operasi5. ICU6. Hemodialisa7. Labor PK8. Labor PA9. IGD
---------------------	---